

## Instruções de Uso

### CÂNULA DESCARTÁVEL



**Nome Técnico:** Cânulas  
**Registro ANVISA:** 80082910068

**Nº de Lote, data de fabricação e validade:** Verificar rotulagem do produto.

**PRODUTO DE USO ÚNICO.  
DESCARTAR APÓS O USO.  
PROIBIDO REPROCESSAR.  
PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR  
ETO (ÓXIDO DE ETILENO).**

**Fabricado por:**

HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.  
No. 1668 Chunjiang East Road,  
Economic Development Zone, Tonglu  
Hangzhou, 311501 Zhejiang - China  
Tel.: +0086-57164633598  
Fax: +0086-57164622980  
Site: [www.hzkangji.com](http://www.hzkangji.com)








**Importado e Distribuído por:**

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ: 02.814.280/0001-05  
Rua Industrial José Flávio Pinheiro 1.150,  
Parque Industrial, João Pessoa / PB  
CEP: 58082-057  
Tel.: 83 3049 8000  
Site: [www.taimin.com.br](http://www.taimin.com.br)

**Responsável Técnico:**

Wagner Germano Nobre Oliveira  
CRF/PB: 2622

### Modelos Comerciais:

Código	Descrição	Dimensões (mm)	Imagem
101Y.561	Cânula Descartável	5.5x70	
101Y.562	Cânula Descartável	6.5x70	
101Y.563	Cânula Descartável	6.5x90	
101Y.564	Cânula Descartável	5.5x110	
101Y.565	Cânula Descartável	8.5x70	
101Y.566	Cânula Descartável	8.5x90	
101Y.567	Cânula Descartável	8.5x110	

**Composição:**

A CÂNULA DESCARTÁVEL é fabricada com PPS (Polisulfeto de Fenileno).

**Condições de Armazenamento e Transporte:**

A CÂNULA DESCARTÁVEL deve ser armazenada e transportada em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas entre 15°C e 40°C e umidade relativa do ar entre 40 a 75%.

**Prazo de Validade:**

A CÂNULA DESCARTÁVEL possui uma validade de 05 anos, após a data de esterilização.

**Forma de Apresentação:**

A CÂNULA DESCARTÁVEL é acondicionada individualmente em blíster devidamente rotulado e etiquetado permitindo a clara visualização do material acondicionado. Este blíster é acondicionado em caixa de papel cartonado, contendo 10 unidades do produto.

**Indicação de Uso/Finalidade:**

A CÂNULA DESCARTÁVEL destina-se à formação de pontos de passagem para instrumentos cirúrgicos, servindo de peça guia ou para possibilitar uma melhor visualização de cavidades sem que haja maiores incisões, resultando assim em um menor trauma cirúrgico. São utilizadas em cirurgia por vídeo que necessitem de pequenas incisões para realização dos procedimentos médicos.

**Modo de uso do produto:**

Antes de utilizar A CÂNULA DESCARTÁVEL leia as instruções de uso detalhadamente. Essas instruções tem o objetivo de auxiliar na utilização do produto.

A escolha do tipo de cânula e metodologia de utilização das mesmas varia de acordo com a técnica empregada pelo cirurgião e é sua a prerrogativa e responsabilidade o emprego da técnica correta de maneira adequada em cada caso específico.

**Seguem outros esclarecimentos sobre o uso do produto:**

- Inspeção a embalagem do produto quanto à presença de cortes, vedação inadequada ou danos causados por umidade e verifique qualquer tipo de avaria no dispositivo; caso haja alguma alteração na estrutura física do produto, inutilize o mesmo.
- O operador do instrumento deve ser um médico ou um profissional da área médica que tenha recebido treinamento suficiente em técnicas de cirurgia por vídeo.

**Condições de Manipulação:**

- Produto só deve ser manipulado por profissional especializado.
- Antes da utilização, examinar as cânulas para verificar se estão funcionando de maneira adequada.
- Ao manusear as cânulas, sempre use técnicas assépticas apropriadas.

**Advertências:**

Produto de Uso Único. Descartar após o uso.

As cânulas foram projetadas, testadas e fabricadas para utilização única em um paciente.

As cânulas são disponibilizadas estéreis, por óxido de etileno, devendo ser verificado antes do uso a integridade de sua embalagem.

Caso seja observada alguma avaria, o produto não deve ser utilizado.

Os demais produtos utilizados no procedimento cirúrgico são registrados à parte.

**Precauções:**

- Deve-se tomar cuidado para garantir que não se coloque força excessiva nas cânulas, a qual pode resultar em falha.
- De forma preventiva, é recomendável ter cânulas de reserva, antes de iniciar o procedimento.
- Precauções adicionais incluem aquelas aplicáveis a todos os procedimentos cirúrgicos, em geral, deve-se tomar cuidado quanto a assepsia e perigos anatômicos.

**Contraindicações e Efeitos adversos:**

É contraindicada a utilização da CÂNULA DESCARTÁVEL para procedimentos e técnicas que estejam fora do escopo de indicação do produto.

Atentar para a hipersensibilidade do paciente à matéria-prima do produto.