

Instruções de Uso

PINÇA PARA LAPAROSCOPIA



Nome Técnico: Pinça para Biópsia
Registro ANVISA: 80082910072

**PRODUTO DE USO MÉDICO.
PRODUTO NÃO ESTÉRIL.
ESTERILIZAR ANTES DO USO.
PRODUTO REUTILIZÁVEL**

Importado e Distribuído por:

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 02.814.280/0001-05
Rua Industrial José Flávio Pinheiro 1.150,
Parque Industrial, João Pessoa / PB
CEP: 58082-057
Tel.: 83 3049 8000
Site: www.taimin.com.br

Fabricado por:




Hangzhou Kangji Medical
Instrument Co., Ltd. No. 1668
Chunjiang East Road,
Economic Development Zone,
Tonglu Hangzhou, 311501
Zhejiang - China
Tel.: +0086-57164633598
Fax: +0086-57164622980
Site: www.hzkangji.com

Responsável Técnico

Wagner Germano Nobre Oliveira
CRF/PB: 2622

Modelos:

Código	Descrição	Imagens
301.031	Pinça tipo Fenestrada, simples ação mandibular, 5mm	
301.031A	Pinça tipo Fenestrada, dupla ação mandibular, 5mm	
301.031AP	Pinça tipo Fenestrada, dupla ação mandibular, 3mmX280mm	
301.031AL	Pinça , tipo Fenestrada, dupla ação mandibular, 5mmx420mm	
301.031B	Pinça , tipo Maryland, simples ação mandibular, 5mm	
301.031BP	Pinça , tipo Maryland, simples ação mandibular, 3mmX280mm	
301.031BL	Pinça , tipo Maryland, simples ação mandibular, 5mm X420mm	
301.031C	Pinça , tipo Maryland, dupla ação mandibular, 5mm	
301.028	Pinça Kleppinger, serrilhado, reta, 5mm	
301.028A	Pinça Kleppinger, serrilhado, curva, 5mm	
301.028AP	Pinça Kleppinger, serrilhado, curva, 3mmX280 mm	
301.028AL	Pinça Kleppinger, serrilhado, curva, 5mmx420 mm	
TM301.039CB	Cabo de conexão circular	
TM301.029	Cabo de conexão, 3000mm	
TM101.082	Cabo monopolar, 3000mm	
TM301.031AHBF	Acessório para Pinça haste fenestrada	
TM301.031AHBFP	Acessório para Pinça haste fenestrada	
TM301.031AHBFL	Acessório para Pinça haste fenestrada	
TM301.031BHBM	Acessório para Pinça haste tipo Maryland	
TM301.031BHBMP	Acessório para Pinça haste tipo Maryland	

TM301.031BHBML	Acessório para Pinça haste tipo Maryland	
TM301.103EB	Manopla para pinça Taimin	
TM301.103TB	Tubo para pinça taimin	

Composição:

As Pinças de Biópsia Taimin® são fabricadas com a utilização do Aço Inoxidável 304 de acordo com a norma ISO 7153-1.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar e transportar o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas entre 15° e 40°C e Umidade 40% a 75%.

Forma de Apresentação:

As Pinças para Laparoscopia são acondicionadas individualmente em saco plástico devidamente rotulado e etiquetado, permitindo a clara visualização do material acondicionado. Estes sacos são acondicionados em caixa de papel cartonado.

Indicação de Uso/Finalidade:

A Pinça para Laparoscopia é um instrumento cirúrgico e foi especialmente desenvolvido para ser utilizado nos vários ambientes de aplicação da cirurgia endoscópica. São amplamente utilizadas para apreensão de tecidos orgânicos em procedimentos cirúrgicos.

Modo de uso do produto:

A escolha do tipo de pinça e metodologia de utilização dos mesmos varia de acordo com a técnica empregada pelo cirurgião e é sua a prerrogativa e responsabilidade o emprego da técnica correta de maneira adequada em cada caso específico. A metodologia de utilização das pinças é parte integrante do desenvolvimento técnico e conhecimento empregado pelo cirurgião. A utilização deste produto é destinada exclusivamente ao uso por Médicos

devidamente qualificados para o procedimento de Endoscopia. Como se trata de um produto que será utilizado em conjunto a um Endoscópio deve-se consultar atentamente o manual do fabricante destes equipamentos para máximo desempenho das Pinças para Laparoscopia.

Os demais produtos utilizados no procedimento cirúrgico serão registrados à parte. Seguem outros esclarecimentos sobre o uso do produto:

Prepare o paciente usando técnicas para endoscopia.

Cheque o funcionamento adequado da pinça.

Introduza a pinça fechado pelo canal de trabalho do endoscópio. Caso a pinça esteja aberta ou com seus movimentos de abertura e fechamento comprometidos não efetue a introdução da mesma no aparelho, pois poderá causar danos ao canal de trabalho.

Acione a abertura da pinça e cheque se o fragmento encontra-se no interior da pinça, transferindo o mesmo para um recipiente adequado.

Sempre tenha um instrumento sobressalente disponível;

Prepare equipamentos de reprocessamento para início imediato do processo de limpeza, após o uso do instrumento;

Inspecione a embalagem do produto quanto à presença de cortes, vedação inadequada ou danos causados por umidade e verifique qualquer tipo de avaria no instrumento, caso haja alguma alteração na estrutura física do produto, inutilize o mesmo.

O operador do instrumento deve ser um médico ou um profissional da área médica sob supervisão de um médico que tenha recebido treinamento suficiente em técnicas endoscópicas.

Este manual, portanto, não explica ou discute procedimentos clínicos endoscópicos. Este somente descreve a operação básica e precauções relacionadas à operação deste instrumento.

Condições de Manipulação:

Produto só deve ser manipulado por profissional especializado.

Método de Esterilização recomendado:

O produto deve ser esterilizado por Autoclave antes do uso, por um dos métodos listados abaixo:

A VAPOR POR GRAVIDADE

T °C	Exposição	Secagem
132 C	15 minutos	45 minutos
135 C	10 minutos	30 minutos

A VAPOR POR VÁCUO

T °C	Exposição	Secagem
132 C	4 minutos	30 minutos
135 C	3 minutos	20 minutos

Advertências:**PRODUTO REUTILIZÁVEL. LIMPAR E ESTERILIZAR ANTES DO USO.**

Ao utilizar o instrumento, sempre use equipamento de proteção pessoal apropriado. Caso contrário, sangue, muco e outros materiais potencialmente infecciosos provenientes do paciente podem representar um risco de controle de infecção.

Não insira o instrumento no endoscópio a não ser que você possua um campo de visão endoscópica nítido. Se você não puder visualizar a extremidade distal da Seção de Inserção no campo de visão endoscópica, este não deve ser utilizado. Isto pode causar lesão ao paciente, tais como perfurações, hemorragias ou danos à membrana mucosa. Isto pode também danificar o endoscópio e/ou instrumento.

Não force o instrumento se for encontrada resistência durante a inserção. Reduza a angulação do endoscópio até que o instrumento passe suavemente. Forçar o instrumento pode danificar o instrumento e/ou endoscópio. Isto pode causar lesões ao paciente, tais como perfurações, hemorragias ou danos à membrana mucosa.

Não avance ou estenda o instrumento abruptamente. Isto pode causar lesões ao paciente, tais como perfurações, hemorragias ou danos à membrana

mucosa. Pode também danificar o endoscópio ou instrumento.

Insira o instrumento lentamente. A inserção abrupta pode danificar o endoscópio e/ou instrumento.

Não force a extremidade distal da Seção de Inserção contra o tecido da cavidade do organismo. Isto pode causar danos ao paciente, tais como perfurações, hemorragias ou danos à membrana mucosa.

Não puxe amostras de tecido com força excessiva. Isto pode causar danos ao paciente, tais como perfurações, hemorragias ou danos à membrana mucosa.

Este instrumento é comercializado de maneira não estéril. Antes de cada utilização do mesmo, este deve ser limpo e esterilizado. Não utilize um instrumento que não tenha sido limpo e esterilizado. Isto representa um risco de controle de infecção ou pode causar irritação e infecções em tecidos.

Precauções:

Manter as técnicas de manipulação seguras quanto ao uso das pinças, devido à possibilidade de perda de fragmento dentro da cavidade, e da possível quebra da mesma durante a sua utilização.

Antes da utilização, examinar o instrumento e verificar se está funcionando de maneira adequada.

Assim como com qualquer instrumento cirúrgico, deve-se tomar cuidado para garantir que não se coloque força excessiva nestes dispositivos, a qual pode resultar em falha.

Precauções adicionais incluem aquelas aplicáveis a todos os procedimentos cirúrgicos. Em geral, deve-se tomar cuidado em especial quanto a assepsia e perigos anatômicos.

Contraindicações:

Não se aplica.