



## INSTRUÇÕES DE USO

### DISPOSITIVO DE SUÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN



#### Detentor do Registro:

CIENLABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 02.814.280/0001-05

Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,

Parque Industrial, João Pessoa / PB

Cep: 58082-057

Tel: +55 83 3049 8000

Site: [www.taimin.com.br](http://www.taimin.com.br)

**PRODUTO DE USO MÉDICO.**

**PRODUTO REUTILIZÁVEL.**

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL.**

**ESTERILIZAR ANTES DO USO.**

O produto deve ser armazenado e transportado em local seco, limpo, protegido da luz, com temperatura entre 5°C e 30°C e com umidade relativa do ar entre 40% e 75%.

#### Manual de Instruções

**Nome Técnico:** Instrumentos Cirúrgicos

**Nome Comercial:** DISPOSITIVO DE SUÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN

**Registro Anvisa Nº:** 80082910193

**Validade:** Indeterminada.

#### Fabricado por:

HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 1668, Chunjiang East Road, Economic Development Zone, Tonglu Hangzhou Zhejiang – China – Post Code: 311501

Tel: +86 571 646 33598

Fax: +86 571 646 22980

Site: [www.hzkangji.com](http://www.hzkangji.com)

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.151L	Dispositivo de Sucção e Irrigação Trompette	Ø 5,0 e Ø 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 420	
101.079-10L	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 420	
101.079T	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante Trompette	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
104.079	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante	Ø 2,8 x 280	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-3	Tubo para Dispositivo	Ø 2,8 x 280	
101.079-V	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.151	Dispositivo de Sucção e Irrigação Trompette	Ø 5,0 e Ø 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 360	
101.079-10	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 360	
101.079T	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante Trompette	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.149	Dispositivo de Sucção e Irrigação Válvula	Ø 5,0 e Ø 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 360	
101.079-10	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 360	
101.079-P	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante Pistão	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079L	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 420	
101.079-10L	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 420	
101.079S	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante Small	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.149L	Dispositivo de Sucção e Irrigação Válvula	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 420	
101.079-10L	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 420	

101.079-P	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante Pistão	--	
-----------	--	----	---

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante	Ø 5,0 e 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 360	
101.079-10	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 360	
101.079S	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante Small	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079BL	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 420	
101.079-10L	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 420	
101.079	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079AL	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante Largo	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 420	

101.079-10L	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 420	
101.079-L	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante Largo	--	

101.079-3 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 2,8 x 280	
101.079-V	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079A	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante Largo	Ø 5,0 e 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 360	
101.079-10	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 360	
101.079-L	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante Largo	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
104.079-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação 2F	Ø 2,8 x 280	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-3 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 2,8 x 280	
101.079-V	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079B	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante	Ø 5,0 e Ø 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 360	
101.079-10	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 360	
101.079	Válvula Irrigação / Sucção Deslizante	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
104.079-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação 2F	Ø 2,8 x 280	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-3 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 2,8 x 280	
101.079-V	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
104.079-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação 1F	Ø 2,8 x 280	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.149-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
10.079-5 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5x 360	
101.079-10 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 360	

101.079-P	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Pistão	--	
-----------	--	----	---

MODELO			
--------	--	--	--

Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.149-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	

PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
--------------------------------	--	--	--

10.079-5 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 360	
101.079-10 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 360	
101.079-P	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Pistão	--	

MODELO			
--------	--	--	--

Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.149-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	

PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
--------------------------------	--	--	--

10.079-5 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 360	
101.079-10 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 360	
101.079-P	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Pistão	--	

MODELO			
--------	--	--	--

Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.149L-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	

PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
--------------------------------	--	--	--

101.079-5L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 420	
--------------	--------------------------	-----------	---

101.-79-10L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 420	
---------------	--------------------------	------------	---

101.079-P	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Pistão	--	
-----------	--	----	---

MODELO			
--------	--	--	--

Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.149L-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	

PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
--------------------------------	--	--	--

101.079-5L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 420	
101.-79-10L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 420	
101.079-P	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Pistão	--	

MODELO			
--------	--	--	--

Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.151-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação Trompeta 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	

PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
--------------------------------	--	--	--

10.079-5 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 360	
101.079-10 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 360	
101.079T	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Trompeta	--	

MODELO			
--------	--	--	--

Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.151-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação Trompeta 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	

PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
--------------------------------	--	--	--

10.079-5 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 360	
101.079-10 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 360	
101.079T	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Trompete	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.151L-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação Trompete 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L	Tubo para Dispositivo	Ø 5 x 420	
101.079-5L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 420	
101.-79-10L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 420	
101.079T	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Trompete	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.151L-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação Trompete 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 420	
101.-79-10L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 420	
101.079T	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Trompete	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
10.079-5 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 360	
101.079-10 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 360	
101.079S	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Small	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
10.079-5 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 360	
101.079-10 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 360	
101.079S	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Small	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079A-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante Largo 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
10.079-5 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 360	
101.079-10 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 360	

101.079-L	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Largo	--	
-----------	---	----	---

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079A-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante Largo 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
10.079-5 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 360	
101.079-10 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 360	
101.079-L	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Largo	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079L-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 420	
101.79-10L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 420	
101.079S	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Small	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079L-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			

101.079-5L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 420	
101.79-10L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 420	
101.079S	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Small	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079B-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
10.079-5 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 360	
101.079-10 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 360	
101.079	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079B-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 360	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
10.079-5 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 360	
101.079-10 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 360	
101.079	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079AL-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante Largo 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 420	
101.79-10L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 420	
101.079-L	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Largo	--	

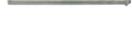
MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079AL-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante Largo 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 420	
101.79-10L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 420	
101.079-L	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Largo	--	

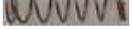
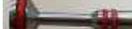
MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079BL-1	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante 1F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 420	

101.79-10L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 420	
101.079	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante	--	

MODELO			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079BL-2	Dispositivo de Sucção e Irrigação Deslizante 2F	Ø 5,0 e 10,0 x 420	
PARTES QUE COMPÕEM ESTE MODELO			
101.079-5L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 420	
101.79-10L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 420	
101.079	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante	--	

PARTES			
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.079-3	Tubo para Dispositivo	Ø 2,8mm x 280mm	
101.079-3 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 2,8 x 280	
101.079-3 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 2,8 x 280	
101.079-5	Tubo para Dispositivo	Ø 5mm x 360mm	
10.079-5 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 360	
10.079-5 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 360	

101.079-5L	Tubo para Dispositivo	Ø 5mm x 420mm	
101.079-5L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 420	
101.079-5L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 420	
101.079-10	Tubo para Dispositivo	Ø 10mm x 360mm	
101.079-10 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 360	
101.079-10 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 360	
101.079-10L	Tubo para Dispositivo	Ø 10 x 420	
101.79-10L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 420	
101.79-10L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 420	
101.079-4	Tubo para Dispositivo	Ø 5mm x 450mm	
101.079-4 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 5 x 450	
101.079-4 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 5 x 450	
101.079-4L	Tubo para Dispositivo	Ø 10mm x 450mm	
101.079-4L 1	Tubo para Dispositivo 1F	Ø 10 x 450	

101.079-4L 2	Tubo para Dispositivo 2F	Ø 10 x 450	
101.079-V	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante		
101.079-P	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Pistão		
101.079-T	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Trompete		
101.079-L	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Largo		
101.079-S	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante Small		
101.079	Válvula Irrigação/Sucção Deslizante		
ML-101.149	Mola		
TMS149	Mola para Tubo de Aspiração		
TP-101.149	Tampa		
VP-101.149	Cilindro		

### Forma de Apresentação

O **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** será embalado individualmente em embalagem plástica (embalagem primária), devidamente rotulado e etiquetado, permitindo uma clara visualização do material acondicionado, sendo acomodado, posteriormente, em caixa de papel cartonado (embalagem secundária).



## Composição

O **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** é composto por Aço Inoxidável 304.

## Indicação de Uso / Finalidade

O **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** é um instrumento indicado para ser utilizado em procedimentos laparoscópicos para irrigação e sucção, como também em outros procedimentos minimamente invasivos, como um instrumento de irrigação e sucção.

## Modo de Uso do Produto

O **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** foi desenvolvido para ser utilizado em procedimentos laparoscópicos ou outros procedimentos minimamente invasivos.

Antes de iniciar o procedimento, o profissional deve realizar uma rigorosa avaliação do dispositivo, avaliando a conformidade do mesmo.

Utilizar protocolo de boas práticas cirúrgicas para realizar o procedimento.

1. Conectar o tubo de sucção ao conector de sucção.
2. Conectar o tubo de irrigação ao conector de irrigação.
3. Segurar o dispositivo com a palma da mão e o polegar.
4. Introduzir o dispositivo dentro do trocarter de tamanho adequado (produto não objeto deste registro).
5. Acionar a válvula de sucção ou válvula de irrigação para obtenção de sucção ou de irrigação.
6. Se for necessário utilizar um outro tamanho de tubo, o profissional deverá desconectar o tubo original, desenroscando no sentido anti-horário enquanto segura a válvula de sucção e irrigação com a mão, e então conectar o tubo de tamanho adequado rosqueando no sentido horário.

## Condições de Manipulação

O **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** deve ser manipulado somente por profissionais devidamente treinados e capacitados para o manuseio do produto.

Lavar cuidadosamente, enxaguar e secar todas as partes do instrumento com ar comprimido (incluindo canais internos e áreas inacessíveis).

Após a limpeza, proceder com esterilização a vapor em autoclave.

Não use limpadores abrasivos.

Use escova de cerdas macias.

Enxague completamente com água destilada.

Pode ser desinfetado em máquina lavadora até 95°C.

## Método de Esterilização

O produto deve ser esterilizado por autoclave antes do uso, com um dos métodos listados abaixo:

ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR GRAVIDADE:		
Temperatura	Tempo de Exposição	Tempo de Secagem
132°C	15 minutos	45 minutos
135°C	10 minutos	30 minutos
ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR VACUO:		
Temperatura	Tempo de Exposição	Tempo de Secagem
132°C	4 minutos	30 minutos
135°C	3 minutos	20 minutos

## Advertências

- Utilize protocolos de boas práticas para a utilização do **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN**, devido ao risco de perfuração de estruturas ou órgãos vitais.
- A utilização deve ser feita corretamente conforme indicação, a fim de se evitar danos aos órgãos internos.
- Avaliar a conformidade do **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** antes de sua utilização. Caso apresente qualquer avaria, o mesmo não poderá ser utilizado.

## Precauções

- O **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** é fornecido não esterilizado.
- Antes da utilização, deve ser realizada a limpeza e esterilização do instrumento de acordo com as instruções.
- Para evitar possíveis lesões nas estruturas tissulares, inserir sempre o **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** sob visualização direta.
- Este dispositivo é composto por Aço Inoxidável. Agir com cuidado ao utilizar dispositivos de eletrocauterização (produto não objeto deste registro), uma vez que poderão ocorrer lesões se o **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** entrar em contato com a corrente elétrica.
- Não utilizar soluções de limpeza ácida ou de esterilização a frio, uma vez que podem danificar o **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN**.
- Este instrumento destina-se a ser utilizado exclusivamente por cirurgiões com experiência em procedimentos endoscópicos.



- Antes da utilização, testar o instrumento para se certificar que o mesmo esteja funcionando corretamente.
- Examinar visualmente o **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN**, para verificar se o mesmo está adequado para utilização.
- Se o **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** não estiver funcionando corretamente ou estiver danificado, o mesmo não deverá ser utilizado.
- Recomenda-se que seja feita uma inspeção cuidadosa tanto no momento da recepção do instrumento como antes de cada utilização.
- Falhas no atendimento as instruções, alertas e precauções podem conduzir a sérias consequências cirúrgicas ou danos para o paciente.

### **Contraindicações e Efeitos adversos**

É contraindicado a utilização do **DISPOSITIVO DE SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO TAIMIN** para procedimentos que estejam fora da indicação de uso para esse produto.

**Responsável Legal:** Marcos Fang Tam  
**Responsável Técnica:** Desiree Barros Rossato  
CRF/PB: 5028