



## INSTRUÇÕES DE USO

### LUVA DE VINIL TAIMIN POWDER FREE



#### Detentor do Registro:

CIENLABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
CNPJ: 02.814.280/0001-05  
Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,  
Parque Industrial, João Pessoa / PB  
Cep: 58082-057  
Tel: +55 83 3049 8000  
Site: [www.taimin.com.br](http://www.taimin.com.br)

**PRODUTO DE USO MÉDICO.**  
**PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.**  
**PROIBIDO REPROCESSAR.**  
**O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.**  
**PRODUTO NÃO ESTÉRIL.**

O produto deve ser transportado em local seco, com temperatura entre 10°C e 30°C e umidade relativa do ar entre 40% e 65%. Proteger as luvas contra a luz ultravioleta, luz do sol e agentes antioxidantes.

#### Manual de Instruções

**Nome Técnico:** Luvas

**Nome Comercial:** LUVA DE VINIL TAIMIN POWDER FREE

**Registro Anvisa Nº:** 80082910235

**Validade:** Indeterminada.

#### Fabricado por:

SHANDONG INTCO MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, 262500 – China

Tel: +86 21 34978818

Fax: +86 21 34978808

Site: [www.intcomedical.com](http://www.intcomedical.com)

## Modelos

Código	Descrição e Dimensões (mm)	Ilustração
LTP-VPFSC	Luva Taimin de Procedimento Vinil sem Pó Transparente – Pequena Dimensões: comprimento: 235, palma da mão: 85, polegar: 54, indicador: 68, médio: 79, anelar: 71, mínimo: 54	
LTP-VPFMC	Luva Taimin de Procedimento Vinil sem Pó Transparente – Média Dimensões: comprimento: 235, palma da mão: 95, polegar: 57, indicador: 72, médio: 82, anelar: 75, mínimo: 56	
LTP-VPFLC	Luva Taimin de Procedimento Vinil sem Pó Transparente – Grande Dimensões: comprimento: 235, palma da mão: 110, polegar: 59, indicador: 74, médio: 85, anelar: 77, mínimo: 60	

## Forma de Apresentação

A **LUVA DE VINIL TAIMIN POWDER FREE** será disponibilizada em embalagem primária de papel cartonado contendo 100 unidades, sendo, posteriormente, acondicionadas em embalagem secundária, também de papel cartonado, contendo todas as informações necessárias. As luvas serão comercializadas e distribuídas em embalagem secundária contendo 01 (uma) unidade ou 10 (dez) unidades de embalagem primária.

## Composição

A **LUVA DE VINIL TAIMIN POWDER FREE** é composta por Policloreto de Vinila (Vinil).

## Indicação de Uso / Finalidade

A **LUVA DE VINIL TAIMIN POWDER FREE** é utilizada na proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos, protegendo contra agentes biológicos (bactérias, vírus e outros), oferecendo o máximo de conforto e com maior liberdade dos movimentos. Também são indicadas para profissionais das áreas alimentícia, estética, frigorífica, doméstica, industrial, limpeza e outros procedimentos em que não há contato com fluidos corpóreos possíveis de contaminação.



## Modo de uso do produto

A LUVA DE VINIL TAIMIN POWDER FREE é utilizada para proteção das mãos do profissional, caracterizando-se como um produto descartável de uso único. Segue abaixo procedimento para utilização correta do produto:

1. Verifique o tamanho da luva correto para a sua mão.
2. Lavar e secar bem as mãos antes de colocar a luva, retirando anéis e outros acessórios.

Para colocar as luvas, siga as orientações descritas abaixo:

- Retire a luva da caixa (embalagem primária).
- Pegue a luva pela borda do punho.
- Coloque a primeira luva.
- Pegue a outra luva com a mão enluvada.
- Coloque a segunda luva.
- Com as mãos enluvadas não toque em nada que não esteja na indicação de uso definida.

Para retirar as luvas, siga as orientações descritas abaixo:

- Segure uma luva pela parte externa, na altura do punho, e puxe em direção à ponta dos dedos; assim a luva sairá do avesso.
- Segure a luva removida com a outra mão enluvada. Coloque os dedos da mão não enluvada na parte interna da luva (entre a luva e o punho). Remova a segunda luva, arrastando-a em direção à ponta dos dedos e da outra luva.
- Descarte as luvas em lixo infectante e lave as mãos com água e sabão.

## Condições de Manipulação

Antes de utilizar a LUVA DE VINIL TAIMIN POWDER FREE, avalie a integridade do produto.

Leia atentamente todas as recomendações para utilização do produto.

A empresa que efetuará o descarte deve possuir um procedimento aprovado e validado para tal ação, para que possa executar descarte seguro e racional "de produto para a saúde", através da contratação de empresa que seja qualificada e habilitada para esta atividade.

## Advertências

- **PRODUTO DE USO MÉDICO.**
- **PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.**
- **PROIBIDO REPROCESSAR.**
- **O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.**
- **PRODUTO NÃO ESTÉRIL.**

- O produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas que possam causar danos ao usuário.
- Não utilize a LUVA DE VINIL TAIMIN POWDER FREE caso apresente qualquer tipo de avaria.

- Não utilize a LUVA DE VINIL TAIMIN POWDER FREE para manipulação de agentes agressivos químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

## Precauções

- Antes de utilizar o produto, realize uma inspeção rigorosa no mesmo. Caso seja observada qualquer não conformidade, o mesmo não deverá ser utilizado.
- Antes de realizar a lavagem das mãos, retire anéis e acessórios.

## Contraindicações e efeitos adversos

Atentar para a hipersensibilidade do paciente à matéria-prima do produto.

**Responsável Legal:** Marcos Fang Tam

**Responsável Técnica:** Desiree Barros Rossato  
CRF/PB: 5028