



INSTRUÇÕES DE USO

SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN



Detentor do Registro:

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 02.814.280/0001-05
Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,
Parque Industrial, João Pessoa / PB
Cep: 58082-057
Tel: +55 83 3049 8000
Site: www.taimin.com.br

PRODUTO DE USO MÉDICO.

PRODUTO REUTILIZÁVEL.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.

ESTERILIZAR ANTES DO USO POR AUTOCLAVE.

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** deve ser transportada em temperatura entre 10°C e 40°C e Umidade Relativa do ar \leq 80%.

Manual de Instruções

Nome Técnico: Instrumental para Laparoscopia

Nome Comercial: SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN

Registro Anvisa Nº: 80082910243

Validade: Indeterminado.

Fabricado por:

HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 1668, Chunjiang East Road, Economic Development Zone, Tonglu Hangzhou, Zhejiang - China - Postal Code 311501

Tel: +86 571 646 33598

Fax: +86 571 646 22980

Site: www.hzkangji.com

Modelos

Código	Descrição	Dimensão	Imagem Gráfica
301.020A	Sacador Ginecológico	Ø 05x420 mm	
301.021A	Sacador Ginecológico	Ø 10x420 mm	

Forma de Apresentação

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** é embalado individualmente em saco plástico (embalagem primária), devidamente rotulado e etiquetado, permitindo a clara visualização do material. Posteriormente, é acondicionado em caixa de papel cartonado devidamente identificada (embalagem secundária).

Composição

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** é composta por Aço Inoxidável AISI 304 (ISO 7153-1).

Indicação de Uso / Finalidade

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** foi desenvolvido para ser utilizada em procedimentos laparoscópicos ou outros procedimentos minimamente invasivos para a retirada de miomas e fibromas uterinos.

Os **SACADORES GINECOLÓGICOS TAIMIN** possuem diferentes formas e desenhos geométricos (variando de dimensões, comprimento e tipo) para atendimento aos diversos tipos de procedimentos cirúrgicos e pacientes.

O cirurgião pode escolher a forma que é mais apropriada em função do procedimento e da anatomia individual do paciente.

Modo de Uso do Produto

Após a total dissecação do tecido a ser retirado o **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** deverá ser introduzido no tecido a ser removido através de um trocater. Após a fixação do **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** no tecido retirar a peça através do trocater ou incisão.

Condições de Manipulação

LIMPEZA

Cada instrumento cirúrgico deve ser limpo e desinfetado após cada uso. Limpeza, inspeção e manutenção adequadas ajudarão a garantir o funcionamento correto dos dispositivos. Esterilize todos os dispositivos antes da cirurgia. Um bom procedimento de limpeza e manutenção prolonga a vida útil do dispositivo. Deve ser dada especial atenção a fendas. Verifique sempre rachaduras, rasgos, abrasões etc. Não use instrumentos danificados. A limpeza deve ser feita imediatamente após cada utilização para obter o melhor efeito. A não limpeza prontamente podem



resultar em partículas aderentes ou secreções secas que podem resistir à limpeza e ou resistir à futura esterilização. Os dispositivos devem ser completamente limpos de todos os materiais estranhos.

Use água morna (20-25°C), ou agente de limpeza. Detergente / produtos de limpeza enzimáticos devem ser utilizados para remover depósitos de proteínas. Siga as instruções do limpador enzimático; enxaguar bem.

- Não utilize agentes de limpeza corrosivos. As soluções de limpeza e os enxaguantes com pH próximo ou próximo de um pH neutro (7,0) são os melhores.

- Não utilize produtos abrasivos.

- Utilize apenas uma escova de cerdas macias.

- Recomenda-se a desinfecção em lavadoras mecânicas, utilizando o produto específico e temperatura conforme recomendação do fabricante do produto.

- Enxaguar abundantemente com água destilada.

- Depois de limpar e enxaguar, seque os instrumentos completamente e cuidadosamente com ar comprimido (incluindo canais internos e áreas altamente inacessíveis).

Nota: Após a limpeza e antes da esterilização, tratar todos os instrumentos com um lubrificante solúvel em água que é considerado como fisiologicamente seguro.

OBSERVAÇÃO

Com o uso cada vez maior dos procedimentos cirúrgicos, que utilizam técnicas endoscópicas, e com a tendência do aumento do número desses procedimentos, realizados em um único dia nos centros cirúrgicos, tem-se notado o emprego excessivo de soluções desinfetantes, que são tanto nocivas ao instrumental, como também às pessoas. Logo, a fim de não prejudicar a produtividade cirúrgica, os instrumentais são mergulhados em soluções iônicas e resquícos de material proteico são cristalizados no contato com estes produtos, causando sérios problemas ao instrumental, como também não garantindo sua perfeita assepsia. Para evitar-se tais incidentes, os profissionais responsáveis pela limpeza e esterilização devem ter em mente que existem tecnologias para autoclavagem que por vezes são mais rápidas do que o tempo de espera da desinfecção química. Observar se a autoclave de ciclo rápido, atende às exigências técnicas, como por exemplo:

- Retirar o ar do interior.

- Ser preferencialmente gravitacional e/ou pulsante.

- Ter controle e monitoramento da temperatura e pressão.

- Usar água DDD para obtenção do vapor.

- Transportar o instrumental de forma rápida, prática e segura.

- Documentar todo o processo.

- Ser um processo validado.

ARMAZENAMENTO

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** devem ser armazenados em uma área limpa, seca e livre de umidade.

Devem ser armazenados individualmente em sua caixa de transporte ou em uma bandeja de proteção com partições. Proteja as pontas com um pano, gaze ou tubulação, se armazenado em gavetas.

Use esterilização em autoclave. Limpe bem os instrumentos de todos os detritos, tecidos e matérias estranhas antes da esterilização. Siga as instruções do fabricante do esterilizador para operação e carregamento de autoclaves. Deve haver exposição direta do vapor a todas as superfícies dos instrumentos que estão sendo

esterilizados incluindo a superfície interna e os canais dos tubos. Deixar o instrumento arrefecer até à temperatura ambiente antes da utilização.

REPAROS E MANUTENÇÃO

Caso seus instrumentos necessitem de reparo ou manutenção, entre em contato com a TAIMIN para obter autorização de retorno e endereço. Os instrumentos enviados à TAIMIN para reparo devem ter uma declaração atestando que cada instrumento foi completamente limpo e esterilizado. A falha em fornecer evidências de limpeza e desinfecção resultará em uma carga de limpeza e no processamento tardio do reparo do instrumento.

Os produtos reparados pela TAIMIN são garantidos por 90 dias. Qualquer mão-de-obra ou peças que se mostrem defeituosas serão substituídas ou reparadas, a critério da TAIMIN, sem custo para o cliente.

Método de Esterilização

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** é recomendada ser esterilizada por Autoclave.

Advertências

É necessário observar as boas práticas cirúrgicas durante a utilização do **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** devido ao risco de perfuração de estruturas ou órgãos vitais; deve-se ter



cautela durante sua utilização a fim de se evitar danos aos órgãos internos; verificar se o **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** não apresentam sinais de oxidação, caso contrário deve-se utilizar outro dispositivo em condições ideais de uso; deve-se ter cuidado na manipulação do instrumento.

É muito importante examinar cuidadosamente o Sacador Ginecológico Taimin para rupturas, rachaduras ou sujidade antes do uso. Não utilize instrumentos danificados. Nunca tente reparar sozinho. Quaisquer reparações feitas pelo cliente anulam a garantia. O serviço e os reparos devem ser encaminhados apenas para pessoas qualificadas e treinadas. Dúvidas sobre manutenção e reparo encaminhar ao departamento de qualidade da Taimin.

Precauções

- Ao utilizar o instrumento, sempre use equipamento de proteção individual apropriado
- Este dispositivo é fornecido não esterilizado.
- Antes da utilização, esterilizar de acordo com as instruções de descontaminação e re-esterilização.
- Agir com todo o cuidado ao recolher o Sacador Ginecológico Taimin, de forma a minimizar o risco de provocar lesões nos tecidos.
- Para evitar possíveis lesões nas estruturas tissulares, inserir sempre o Sacador Ginecológico Taimin sob visualização direta.
- Não force o instrumento se for encontrada resistência durante a inserção.
- Não insira, avance ou estenda o instrumento abruptamente.
- Este dispositivo é de aço inoxidável. Agir com cuidado ao utilizar dispositivos de eletro-cauterização uma vez que poderão ocorrer lesões se o Sacador Ginecológico Taimin entrar em contato com a corrente elétrica.
- Estes instrumentos destinam-se a ser utilizado exclusivamente por cirurgiões com experiência em procedimentos laparoscópicos.
- Antes da utilização, testar o instrumento para certificar o funcionamento correto.
- Examinar visualmente o instrumento, especial atenção a integridade e limpeza para verificar se não apresentam danos.
- Para garantir o funcionamento seguro e adequado dos instrumentos cirúrgicos é essencial efetuar uma manutenção adequada dos mesmos.
- Deve ser feita uma inspeção cuidadosa tanto no momento da recepção do instrumento como antes de cada utilização.
- Durante os procedimentos cirúrgicos deve-se evitar esforços excessivos, pois os mesmos poderão acarretar dano ao SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN. - Falhas no atendimento a instruções, alertas e precauções podem conduzir a sérias consequências cirúrgicas ou danos para o paciente.

- A esterilização não substitui a limpeza, e nunca será atingida com o material sujo.

Contraindicações e Efeitos adversos

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** destina-se a ser utilizado exclusivamente conforme indicado e deve ser utilizado exclusivamente por cirurgiões com experiência em procedimentos laparoscópicos e não se destina a ser utilizado em condições em que as técnicas cirúrgicas minimamente invasivas sejam contraindicadas.

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** não produz nenhum efeito secundário ou efeitos colaterais indesejáveis, se todas as recomendações deste Manual de Utilização forem tomadas.

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** não possui nenhuma contraindicação. Somente pode ser usado ou operado por profissional qualificado (médico) ou supervisionado pelo mesmo.

O **SACADOR GINECOLÓGICO TAIMIN** não produz nenhum efeito adverso secundário ou efeitos colaterais indesejáveis, se todas as recomendações deste Manual de Utilização forem tomadas. Atentar para a hipersensibilidade do paciente à matéria prima do produto.

Responsável Legal: Marcos Fang Tam

Responsável Técnica: Desiree Barros Rossato

CRF/PB: 5028