



INSTRUÇÕES DE USO

LÂMINAS DE SERRA ESTÉRIL TAIMIN



Detentor do Registro:

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 02.814.280/0001-05
 Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,
 Parque Industrial, João Pessoa / PB
 Cep: 58082-057
 Tel: +55 83 3049 8000
 Site: www.taimin.com.br

PRODUTO DE USO MÉDICO.
O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.
PRODUTO ESTÉRIL.
ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

O produto deve ser armazenado e transportado em local seco, limpo, protegido da luz, com temperatura entre 15° e 40°C e com umidade relativa do ar entre 30% e 80%.

Manual de Instruções

Nome Técnico: Lâminas Descartáveis

Nome Comercial: Lâminas de Serra Estéril Taimin

Registro Anvisa Nº: 80082910234

Validade: 02 anos a partir da data de esterilização (vide rotulagem do produto).





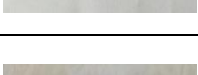
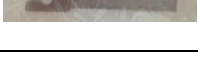





Fabricado por:

SHANGHAI XINSHENG PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.
 Rua 118, 3º ANDAR, Nº 59, SUIDE RD, SHANGHAI, CHINA
 Tel: +86 21 52709815
 Fax: +86 21 52700063
 Site: www.cinsum.com

Modelos

Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
BJ6020S	Lâmina de serra de oscilação	120 x 22 x 1,2	
BJ6021S	Lâmina de serra de oscilação	115 x 13 x 1	

70004	Lâmina de serra de oscilação	120 x 22 x 0,8	
70005	Lâmina de serra de oscilação	120 x 22 x 1,0	
70006	Lâmina de serra de oscilação	120 x 22 x 1,2	
70028	Lâmina de serra de oscilação	110 x 22 x 0,8	
70029	Lâmina de serra de oscilação	110 x 22 x 1,0	
70030	Lâmina de serra de oscilação	110 x 22 x 1,2	
70034	Lâmina de serra de oscilação	110 x 13 x 0,8	
70035	Lâmina de serra de oscilação	110 x 13 x 1,0	
70036	Lâmina de serra de oscilação	110 x 13 x 1,2	
70040	Lâmina de serra de oscilação	102 x 13 x 1,2	
70043	Lâmina de serra de oscilação	92 x 22 x 0,8	
70044	Lâmina de serra de oscilação	92 x 22 x 1,0	
70045	Lâmina de serra de oscilação	92 x 22 x 1,2	
70048	Lâmina de serra de oscilação	92 x 13 x 0,8	
70046	Lâmina de serra de oscilação	92 x 13 x 1,0	
70047	Lâmina de serra de oscilação	92 x 13 x 1,2	

70064	Lâmina de serra de oscilação	77 x 33 x 0,8	
70113	Lâmina de serra de oscilação	120 x 22 x 0,8	
70112	Lâmina de serra de oscilação	120 x 22 x 1,0	
70111	Lâmina de serra de oscilação	120 x 22 x 1,2	
70091	Lâmina de serra de oscilação	120 x 13 x 0,8	
70090	Lâmina de serra de oscilação	120 x 13 x 1,0	
70089	Lâmina de serra de oscilação	120 x 13 x 1,2	
70207	Lâmina de serra recíprocante	54,3 x 1,0	
70209	Lâmina de serra recíprocante	95,3 x 1,0	
70211	Lâmina de serra recíprocante	114,3 x 1,0	
70213	Lâmina de serra recíprocante	105,0 x 1,0	

Forma de Apresentação

A **LÂMINA DE SERRA ESTÉRIL TAIMIN** é embalada em envelope de papel grau cirúrgico e cobertura de polietileno, devidamente rotulados e etiquetados, sendo acondicionada posteriormente em envelope de papel cartonado onde será comercializada.

Composição

A **LÂMINA DE SERRA ESTÉRIL TAIMIN** é composta por Aço Inoxidável 3Cr13.

Indicação de Uso / Finalidade

A **LÂMINA DE SERRA ESTÉRIL TAIMIN** é indicada na utilização de procedimentos cirúrgicos

ortopédicos para serrar, raspar e retirar excessos que se encontrem no osso ou cartilagem de diversas partes do corpo.

Modo de uso do produto

As lâminas possuem design específico para desempenhar as funções que foram projetadas nas cirurgias. Elas se movimentam e são acionadas mediante o encaixe com aparelho perfurador.

Os diversos tipos de serras permitem uma grande variação de sentidos e amplitudes de cortes, além de permitir um ângulo de acesso variado para as diversas ações nos tecidos.

A peça manual onde a lâmina de serra é encaixada é parte dos componentes do aparelho perfurador e não são objetos desse registro. O perfurador também não é objeto deste registro.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, tipo e dimensão dos instrumentos e produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

Assim sendo, a utilização do instrumental é restrita a profissionais altamente habilitados, qualificados e que dominam a técnica cirúrgica específica necessária para o uso da lâmina de serra.

Seguem outros esclarecimentos sobre o uso do produto:

- Prepare o paciente usando técnicas para a cirurgia.
- Cheque o funcionamento adequado de cada peça.
- Sempre tenha um instrumento sobressalente disponível.
- Inspeção a embalagem do produto quanto à presença de cortes, vedação inadequada ou danos causados por umidade e verifique qualquer tipo de avaria no produto. Caso apresente alguma alteração na estrutura física do produto, inutilize o mesmo.
- O operador do instrumento deve ser um médico ou um profissional da área médica sob supervisão de um médico que tenha recebido treinamento suficiente em técnicas ortopédicas.
- Estas informações, portanto, não explicam ou discutem procedimentos clínicos ortopédicos.

Condições de Manipulação

A **LÂMINA DE SERRA ESTÉRIL TAIMIN** deve ser manipulada por profissionais habilitados e familiarizados com a técnica em ambientes assépticos.

Método de Esterilização

A **LÂMINA DE SERRA ESTÉRIL TAIMIN** foi esterilizada por Óxido de Etileno e seguindo as



instruções de uso do produto e as devidas precauções e advertências quanto a embalagem do produto, esta esterilização será mantida.

Advertências

- A correta manipulação do instrumental durante a operação é decisiva para o sucesso do procedimento.
- Não utilizar componentes de outros fabricantes devido a possíveis incompatibilidades de materiais, dimensionais e de projetos.
- Remover o produto de sua embalagem somente no momento da utilização e manusear em campos estéreis para assegurar a esterilidade.
- Produto Estéril - Óxido de Etileno.
- O fabricante recomenda o uso único.

Precauções

- Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada.

Contraindicações e efeitos adversos

Não há nenhuma contraindicação absoluta conhecida ao uso do produto.

Responsável Legal: Marcos Fang Tam
Responsável Técnica: Desiree Barros Rossato
CRF/PB: 5028