



## INSTRUÇÕES DE USO

### PINÇA BULLDOG TAIMIN



#### Detentor do Registro:

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
 CNPJ: 02.814.280/0001-05  
 Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,  
 Parque Industrial, João Pessoa / PB  
 Cep: 58082-057  
 Tel: +55 83 3049 8000  
 Site: [www.taimin.com.br](http://www.taimin.com.br)

**PRODUTO DE USO MÉDICO.**  
**PRODUTO REUTILIZÁVEL.**  
**PRODUTO NÃO ESTÉRIL.**  
**ESTERILIZAR ANTES DO USO.**

O produto deve ser armazenado e transportado em local seco, limpo, protegido da luz, com temperatura entre 5° e 30°C e com umidade relativa do ar entre 40% e 75%.

#### Manual de Instruções

**Nome Técnico:** Pinças Articuladas  
**Nome Comercial:** PINÇA BULLDOG TAIMIN  
**Registro Anvisa Nº:** 80082910189  
**Validade:** Indeterminada.

#### Fabricado por:

HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.  
 No. 1668, Chunjiang East Road, Economic Development Zone, Tonglu Hangzhou Zhejiang – China – Post Code: 311501  
 Tel: +86 571 646 33598  
 Fax: +86 571 646 22980  
 Site: [www.hzkangji.com](http://www.hzkangji.com)

#### Modelos

Código	Descrição	Dimensões (mm)	Ilustração
101.120	Pinça Clamp Vascular Bulldog	10,5 x 360	
101.120A	Pinça Clamp Vascular Bulldog	12,5 x 360	

101.120B	Pinça Clamp Vascular Bulldog	10 x 360	
----------	------------------------------	----------	--

#### Acessórios

Código	Descrição	Dimensões	Ilustração
101.201-1	Clamp para Pinça Bulldog	45 mm Reto	
101.201-2	Clamp para Pinça Bulldog	65 mm Reto	
101.202-1	Clamp para Pinça Bulldog	45 mm Curvo	
101.202-2	Clamp para Pinça Bulldog	65 mm Curvo	
101.203-1	Clamp para Pinça Bulldog	45 mm Curvo S	
101.203-2	Clamp para Pinça Bulldog	65 mm Curvo S	
101.120-F1800	Clamp reto para pinça Bulldog	25mm sem dente	
101.120-F1700	Clamp curvo para pinça Bulldog	25mm sem dente	
101.120-F1300	Clamp reto para pinça Bulldog	25mm com dente	
101.120-F0600	Clamp curvo para pinça Bulldog	25mm com dente	
101.120-F1600	Clamp reto para pinça Bulldog	35mm com dente	
101.120-F1500	Clamp curvo para pinça Bulldog	35mm com dente	

#### Forma de Apresentação

A **PINÇA BULLDOG TAIMIN** será embalada individualmente em embalagem plástica (embalagem primária), devidamente rotulada e etiquetada, permitindo uma clara visualização do



material acondicionado, sendo acomodada, posteriormente, em caixa de papel cartonado (embalagem secundária).

## Composição

A **PINÇA BULLDOG TAIMIN** é composta por Aço Inoxidável 304, Aço Inoxidável 630 e Polifenileno (PPS).

## Indicação de Uso / Finalidade

A **PINÇA BULLDOG TAIMIN** é utilizada em cirurgias onde o fluxo sanguíneo deve ser interrompido ou controlado temporariamente para que o órgão seja manipulado de acordo com a necessidade em que a técnica aplicada pelo cirurgião exige. A hemostasia é obtida durante o procedimento cirúrgico a partir da compressão vascular, mediante a utilização da **PINÇA BULLDOG TAIMIN**, em conjunto com o clamp. Os clamps são partes da pinça, utilizados para impedir o sangramento durante o procedimento cirúrgico, conferindo às pinças uma função conjunta de estancar sangramento e promover hemostase. A hemostasia cirúrgica é o conjunto de manobras, que tem por objetivo prevenir, diminuir ou deter o sangramento, garantindo uma boa visibilidade do campo operatório e melhor condição técnica. A hemostasia temporária é obtida durante o procedimento cirúrgico, a partir da compressão vascular, mediante emprego de pinças atraumáticas tipo Bulldog, em conjunto com seus clamps, que vão estancar o sangramento. Sendo assim, os clamps são partes fundamentais que devem estar à disposição do cirurgião durante a utilização da **PINÇA BULLDOG TAIMIN**.

## Modo de Uso do Produto

A **PINÇA BULLDOG TAIMIN** foi desenvolvida para ser utilizada em procedimentos cirúrgicos para parar o fluxo sanguíneo para um órgão particular de interesse.

A **PINÇA BULLDOG TAIMIN** poderá ser introduzida através de um trocarer de 10 ou 13 mm ou de um trocarer maior desde que equipado com um redutor.

A **PINÇA BULLDOG TAIMIN** destina-se a ser utilizada exclusivamente por cirurgiões com experiência em procedimentos cirúrgicos.

A **PINÇA BULLDOG TAIMIN** não pode ser utilizada em condições em que as técnicas cirúrgicas minimamente invasivas sejam contraindicadas.

A escolha da técnica a ser aplicada ao procedimento cirúrgico é de responsabilidade exclusiva do cirurgião.

É de extrema importância que o profissional utilize protocolos de boas práticas cirúrgicas

durante a utilização da **PINÇA BULLDOG TAIMIN**, evitando risco de perfurações de estruturas ou órgãos vitais.

Antes da utilização o profissional deverá fazer uma avaliação da conformidade da **PINÇA BULLDOG TAIMIN**. Caso apresente qualquer não conformidade, a mesma deverá ser substituída.

## Condições de Manipulação

A **PINÇA BULLDOG TAIMIN** deve ser limpa após cada utilização. Uma limpeza, inspeção e manutenção adequada ajudarão a garantir o funcionamento correto dos dispositivos. Limpe, inspecione e teste cada dispositivo com atenção e cuidado. Um bom procedimento de limpeza, manutenção, armazenamento e transporte adequado prolongam a vida útil do produto.

Não use instrumentos danificados ou que apresente qualquer tipo de avaria. Tenha sempre um produto em condições ideais para uso de reserva, caso sejam encontradas não conformidades na inspeção física da embalagem e produto.

A limpeza deve ser feita imediatamente após cada utilização para obter o melhor efeito. A não realização da limpeza prontamente, pode resultar em partículas aderentes ou secreções secas que podem resistir à limpeza e ou resistir à futura esterilização.

Detergente e produtos de limpeza enzimáticos devem ser utilizados para remover depósitos de proteínas. Siga as instruções do limpador enzimático; enxaguar bem.

Não utilize agentes de limpeza corrosivos. As soluções de limpeza e os com pH próximo de um pH neutro (7,0) são os melhores.

Não utilize produtos abrasivos.

Enxaguar abundantemente com água corrente.

Utilize apenas uma escova de cerdas macias.

Para realizar a lavagem da **PINÇA BULLDOG TAIMIN**, podem ser utilizadas lavadoras em temperatura até 95°C (203°F).

Depois de limpar e enxaguar, seque os instrumentos completa e cuidadosamente com ar comprimido (incluindo canais internos e áreas altamente inacessíveis).

A **PINÇA BULLDOG TAIMIN** será fornecida limpa, não estéril e deve ser esterilizada antes do uso.

## Método de Esterilização

O produto deve ser esterilizado por autoclave antes do uso, com um dos métodos listados abaixo:



ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR GRAVIDADE:		
Temperatura	Tempo de Exposição	Tempo de Secagem
132°C	15 minutos	45 minutos
135°C	10 minutos	30 minutos

  

ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR VACUO:		
Temperatura	Tempo de Exposição	Tempo de Secagem
132°C	4 minutos	30 minutos
135°C	3 minutos	20 minutos

## Advertências

- É necessário que o profissional utilize as boas práticas cirúrgicas durante a utilização da **PINÇA BULLDOG TAIMIN**, devido ao risco de perfuração de estruturas ou órgãos vitais.
- Deve-se ter cautela durante sua utilização a fim de se evitar danos aos órgãos internos.
- Verificar se a **PINÇA BULLDOG TAIMIN** não apresenta qualquer tipo de avaria.
- Sendo observado qualquer tipo de avaria, deve-se utilizar outro dispositivo em condições ideais de uso.
- O profissional deverá ter cuidado na manipulação do instrumento, evitando acidentes a ele próprio e lesões ao paciente.
- É muito importante examinar cuidadosamente a **PINÇA BULLDOG TAIMIN** para observar certas avarias como: rupturas, rachaduras ou mau funcionamento antes do uso, evitando qualquer tipo de dano.
- Não utilize instrumentos danificados.

## Precauções

- Este dispositivo é fornecido não estéril. Antes da utilização, esterilizar de acordo com as instruções de esterilização.
- Agir com todo o cuidado ao recolher a **PINÇA BULLDOG TAIMIN**, de forma a minimizar o risco de provocar lesões nos tecidos.
- Para evitar possíveis lesões nas estruturas tissulares, sempre insira a **PINÇA BULLDOG TAIMIN** sob visualização direta.
- Este dispositivo é composto por Aço Inoxidável. Agir com cuidado ao utilizar dispositivos de eletrocauterização uma vez que poderão ocorrer lesões se a **PINÇA BULLDOG TAIMIN** entrar em contato com a corrente elétrica.
- Estes instrumentos destinam-se a ser utilizados exclusivamente por cirurgiões com experiência em procedimentos laparoscópicos.
- Antes da utilização, testar o instrumento e avaliar a conformidade, garantindo a segurança do paciente durante o procedimento cirúrgico.
- Se a **PINÇA BULLDOG TAIMIN** não estiver funcionando corretamente ou se estiver danificada, a mesma não deverá ser utilizada.

- Para garantir o funcionamento seguro e adequado dos instrumentos cirúrgicos, é essencial efetuar uma manutenção adequada dos mesmos.
- Recomenda-se que seja feita uma inspeção cuidadosa tanto no momento da recepção do instrumento como antes de cada utilização.
- Durante os procedimentos cirúrgicos, deve-se evitar esforços excessivos, pois os mesmos poderão acarretar na quebra dos elementos da **PINÇA BULLDOG TAIMIN**.
- Falhas no atendimento as instruções, alertas e precauções podem conduzir a sérias consequências cirúrgicas ou danos para o paciente. A esterilização não substitui a limpeza, e nunca será atingida caso o material não esteja limpo de forma correta ou esteja sujo.

## Contraindicações e Efeitos adversos

É contraindicado a utilização do **PINÇA BULLDOG TAIMIN** para procedimentos que estejam fora do escopo de indicação de uso para esse produto.

**Responsável Legal:** Marcos Fang Tam  
**Responsável Técnica:** Desiree Barros Rossato  
CRF/PB: 5028