

## INSTRUÇÕES DE USO

### BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN



#### Detentor do Registro:

CENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
 CNPJ: 02.814.280/0001-05  
 Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,  
 Parque Industrial, João Pessoa / PB  
 Cep: 58082-057  
 Tel: +55 83 3049 8000  
 Site: [www.taimin.com.br](http://www.taimin.com.br)

**PRODUTO DE USO MÉDICO.  
 O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.  
 PRODUTO ESTÉRIL.  
 ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO.**

O produto deve ser armazenado e transportado em local seco, ventilado e sem gás corrosivo, e longe de luz solar direta e chuva, com temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), e umidade relativa do ar não superior a 80%.

#### Manual de Instruções

**Nome Técnico:** Introdutores

**Nome Comercial:** Bainha De Acesso Ureteral Uropro Taimin

**Registro Anvisa Nº:** 80082919067

**Validade:** 03 anos

#### Fabricado por:

**HUNAN VMT TECHNOLOGY CO., LTD.**  
 Floor 1-2, Building 4,  
 High-tech Industry Development Zone  
 Medical Device Industrial Park,  
 415400, Jinshi City, Hunan Province,  
 P.R. China

## Modelos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
BA095035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 9.5FR x 35cm	
BA095045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 9.5FR x 45cm	
BA100035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 10FR x 35cm	
BA100045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 10FR x 45cm	
BA110035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 11FR x 35cm	
BA110045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 11FR x 45cm	
BA120035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 12FR x 35cm	
BA120045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 12FR x 45cm	
BA140035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 14FR x 35cm	
BA140045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 14FR x 45cm	

## Forma de Apresentação

A **BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN** é comercializado de forma estéril em filme composto Tyvek (embalagem primária), sendo acondicionado posteriormente em caixa de papel cartonado (embalagem secundária).

## Composição

A **BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN** é composta por Poliamida



com Revestimento Hidrofílico, Aço Inoxidável 304 (SS 304), Politetrafluoroetileno (PTFE), Nylon, Polietileno (PE) e Polipropileno (PP).

### Indicação de Uso / Finalidade

A **BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN** tem como finalidade manter o acesso ureteral aberto para a realização de procedimentos urológicos endoscópicos, a fim de facilitar a passagem de endoscópicos e outros instrumentos nas vias urinárias.

Durante trocas repetidas de instrumentos, a bainha faz a proteção do ureter. A bainha também protege instrumentos delicados e endoscópios flexíveis menores contra danos.

Tem um revestimento hidrofílico para criar uma superfície de baixo atrito à medida que o ureter é dilatado.

### Modo de Uso do Produto

- Selecione a especificação e o modelo adequados do produto, conforme necessário.
- Verifique a embalagem antes de usar. Não use o produto se ele estiver danificado ou tiver sido aberto.
- Insira o fio guia (produto não objeto deste registro) no ureter até a pelve renal, com a ajuda de um endoscópio.
- Trave firmemente o clipe de travamento do dilatador na base do tubo da bainha.
- Empurre o conjunto do dilatador e do tubo da bainha ao longo do fio guia para que ele entre no ureter. Observação: Uma pequena quantidade de lubrificante estéril pode ser aplicada ao conjunto dilatador/tubo da bainha.
- Confirme se o conjunto do dilatador e do tubo da bainha está no lugar por meio de fluoroscopia.
- Fixe o tubo da bainha na posição, solte o clipe de travamento e remova o dilatador.
- Insira os instrumentos, como o endoscópio, no tubo da bainha.
- Após o uso, descarte-o uniformemente de acordo com os procedimentos de descarte do hospital.

Observação: A base do tubo da bainha pode ser fixada externamente com suturas. Os orifícios de sutura estão localizados na base do tubo da bainha.

### Condições de Manipulação

O produto só pode ser manipulado por profissional devidamente habilitado.

### Método de Esterilização

A **BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN** é esterilizado por Óxido de Etileno - Eto.

### Advertências

Não se aplica.

### Precauções

- Este produto só pode ser manuseado pela equipe médica. Antes de usar, é essencial ler atentamente o manual de instruções.
- O período de validade desse produto é de três anos. Confirme a data de validade antes de usar. O uso de produtos vencidos é estritamente proibido.
- Não altere arbitrariamente a estrutura deste produto durante o uso.
- Este produto é esterilizado com óxido de etileno. Seu uso é estritamente proibido caso a embalagem esteja danificada ou caso haja alterações na aparência e na estrutura do produto.
- Resíduos devem ser descartados de acordo com os regulamentos do hospital ou do departamento de proteção ambiental.

### Efeitos Adversos

Não se aplica.

### Contraindicações

Não se aplica.

**Responsável Legal:** Marcos Fang Tam  
**Responsável Técnica:** Desiree Barros Rossato  
CRF/PB: 5028