

## INSTRUÇÕES DE USO

### EXTRATOR DE CÁLCULOS UROPRO TAIMIN



#### Detentor do Registro:

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
CNPJ: 02.814.280/0001-05  
Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,  
Parque Industrial, João Pessoa / PB  
Cep: 58082-057  
Tel: +55 83 3049 8000  
Site: [www.taimin.com.br](http://www.taimin.com.br)

**PRODUTO DE USO MÉDICO.**  
**O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.**  
**PRODUTO ESTÉRIL.**  
**ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO.**

O produto deve ser armazenado e transportado em local seco, ventilado e sem gás corrosivo, e longe de luz solar direta e chuva, com temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), e umidade relativa do ar não superior a 80%.

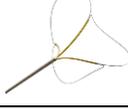
#### Manual de Instruções

**Nome Técnico:** Extrator de Cálculos  
**Nome Comercial:** Extrator De Cálculos Uropro Taimin  
**Registro Anvisa Nº:** 80082919072  
**Validade:** 03 anos

#### Fabricado por:

**HUNAN VMT TECHNOLOGY CO., LTD.**  
Floor 1-2, Building 4,  
High-tech Industry Development Zone  
Medical Device Industrial Park,  
415400, Jinshi City, Hunan Province,  
P.R. China

## Modelos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
EFPRO017120	Extrator de Cálculos UroPro Taimin 1.7FR, 3 Fios e 120cm	
ECPRO017120	Extrator de Cálculos UroPro Taimin 1.7FR, 4 Fios e 120cm	
EFPRO019120	Extrator de Cálculos UroPro Taimin 1.9FR, 3 Fios e 120cm	
ECPRO019120	Extrator de Cálculos UroPro Taimin 1.9FR, 4 Fios e 120cm	
EFPRO021120	Extrator de Cálculos UroPro Taimin 2.1FR, 3 Fios e 120cm	
ECPRO021120	Extrator de Cálculos UroPro Taimin 2.1FR, 4 Fios e 120cm	

## Forma de Apresentação

O **EXTRATOR DE CÁLCULOS UROPRO TAIMIN** é comercializado de forma estéril em Bandeja PET lacrada com papel Tyvek (embalagem primária), sendo acondicionado posteriormente em caixa de papel cartonado (embalagem secundária).

## Composição

O **EXTRATOR DE CÁLCULOS UROPRO TAIMIN** é composta por Liga de Nitinol, Aço Inoxidável 304, Pebax, Polietileno Tereftalato (PET) e Resina de Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (ABS).

## Indicação de Uso / Finalidade

O **EXTRATOR DE CÁLCULOS UROPRO TAIMIN** foi projetado para uso durante o diagnóstico e o tratamento do sistema urinário para fazer a apreensão, manipulação e remoção de cálculos e outros espécimes, sob orientação endoscópica.



## Modo de Uso do Produto

- Selecione o tamanho apropriado do produto, conforme necessário.
- Verifique se a embalagem e o produto apresentam algum dano. Se houver algum dano ou contaminação, substitua o EXTRATOR DE CÁLCULOS UROPRO TAIMIN por um novo.
- Remova o EXTRATOR DE CÁLCULOS UROPRO TAIMIN da embalagem externa e confirme se a ponta do cesto está expandindo e recolhendo corretamente.
- Insira o EXTRATOR DE CÁLCULOS UROPRO TAIMIN no tubo do endoscópio (produto não objeto deste registro) e, com a ajuda do instrumento de visualização, guie o EXTRATOR DE CÁLCULOS UROPRO TAIMIN até a área-alvo.
- Empurre o cesto até a área-alvo, deslize o controle deslizante na alça para expandir o cesto e ajuste lentamente a posição do cesto até que o objeto-alvo seja capturado pela ponta do cesto.
- Deslize o controle deslizante na alça para apertar o cesto e prender a pedra dentro do cesto.
- Mantenha o objeto-alvo no cesto e retire-o lentamente.
- Após o uso, descarte-o uniformemente de acordo com os procedimentos de descarte da instituição hospitalar.

## Condições de Manipulação

O produto só pode ser manipulado por profissional devidamente habilitado.

## Método de Esterilização

O EXTRATOR DE CÁLCULOS UROPRO TAIMIN é esterilizado por Óxido de Etileno - Eto.

## Advertências

Não se aplica.

## Precauções

- Sempre siga os procedimentos estéreis ao operar este produto.
- Ao inserir o produto pelo endoscópio (produto não objeto deste registro) no trato urinário, manuseie-o com cuidado para evitar danos aos tecidos do corpo.

- Durante o transporte, proteja o produto contra umidade, luz solar direta, chuva, altas temperaturas, pressão pesada e impacto.
- O uso deste produto deve estar em conformidade com os protocolos e regulamentos relevantes do departamento médico e deve ser utilizado somente por profissionais treinados.
- Não altere a estrutura do produto durante o uso.
- Após o uso, manuseie o produto com cuidado para evitar infecções e descarte-o como lixo hospitalar.

## AVISOS:

- Este produto é estéril, esterilizado com óxido de etileno. Se a bolsa de papel-plástico estiver danificada, suja ou se o produto apresentar qualquer sinal de dano ou quebra, não o utilize.

## Efeitos Adversos

Não se aplica.

## Contraindicações

- Pacientes com infecções graves do trato urinário.
- Pacientes com hiperplasia prostática.

**Responsável Legal:** Marcos Fang Tam

**Responsável Técnica:** Desiree Barros Rossato  
CRF/PB: 5028