



INSTRUÇÕES DE USO

BOLSA COLETORA ENDOBAG PARA HISTERO TAIMIN



Detentor do Registro:

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 02.814.280/0001-05
Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,
Parque Industrial, João Pessoa / PB
Cep: 58082-057
Tel: +55 83 3049 8000
Site: www.taimin.com.br

PRODUTO DE USO MÉDICO.

PRODUTO DE USO ÚNICO.

DESCARTAR APÓS O USO.

PROIBIDO REPROCESSAR

PRODUTO ESTÉRIL.

ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO.

O produto deve ser armazenado e transportado em uma sala com umidade relativa não superior a 80%, livre de gases corrosivos, bem ventilada e limpa, evitando a luz solar direta, com temperatura -10°C ~+50°C.

Manual de Instruções

Nome Técnico: Bolsas Coletoras

Nome Comercial: Bolsa Coletora Endobag Para Histero Taimin

Registro Anvisa Nº: 80082919078

Validade: 03 anos

Fabricado por:

HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 1668, Chunjiang East Road, Economic Development Zone Tonglu, Zhejiang Province - China
Tel: +86 571 69900010

Site: www.kangjimed.com

Modelos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
104Y.601	Bolsa Coletora Endobag Taimin, descartável, para histero, com tubo introdutor de 12,5 × 300 mm e bolsa com dimensões de 170 × 250 mm, capacidade 1200 ml.	
104Y.603	Bolsa Coletora Endobag Taimin, descartável, para histero, com tubo introdutor de 15 × 300 mm e bolsa com dimensões de 150 × 270 mm, capacidade 1200 ml.	
104Y.604	Bolsa Coletora Endobag Taimin, descartável, para histero, com tubo introdutor de 15 × 300 mm e bolsa com dimensões de 200 × 300 mm, capacidade 2000 ml.	
104Y.605	Bolsa Coletora Endobag Taimin, descartável, para histero, com tubo introdutor de 15 × 300 mm e bolsa com dimensões de 220 × 300 mm, capacidade 2500 ml.	

Forma de Apresentação

A **BOLSA COLETORA ENDOBAG PARA HISTERO TAIMIN** é comercializada de forma estéril em uma bag de PE + Tyvek (embalagem primária), sendo acondicionado posteriormente, em caixa de papel cartonado (embalagem secundária), podendo ser comercializado individualmente ou em embalagem contendo 10 (dez) unidades, devidamente rotulado.

Composição

A **BOLSA COLETORA ENDOBAG PARA HISTERO TAIMIN** é fabricada em TPU - Poliuretano Termoplástico, PPS - Polissulfeto de Fenileno e Nylon.



Indicação de Uso / Finalidade

A **BOLSA COLETORA ENDOBAG PARA HISTERO TAIMIN** é indicada para uso em procedimentos clínicos, destinada à coleta e remoção de amostras do corpo do paciente.

Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

A **BOLSA COLETORA ENDOBAG PARA HISTERO TAIMIN** funciona como um dispositivo de contenção física, sendo introduzida no interior do corpo por meio de instrumental adequado. Após posicionamento, permite a coleta de amostras, possibilitando sua remoção de forma controlada durante o procedimento.

Modo de Uso do Produto

- Retire o produto da embalagem.
- Empurre a haste para dentro para estender o saco da haste da manga e abra o saco com o dispositivo de expansão.
- Retire os tecidos ou amostras excisados para colocá-los no saco;
- Depois de colocar todos os tecidos ou amostras no saco, puxe a boca do saco para fora do corpo e estabeleça pneumoperitônio com CO₂, depois trate dos tecidos (por exemplo, separando-os).
- Puxe o saco para fora da abertura da cânula e retire-o do saco juntamente com a cânula.
- Se o tecido a ser removido for maior, após retirar o saco da parede abdominal, pare de puxar com força. Primeiro, retire parte do tecido com uma pinça e, em seguida, puxe o saco para fora do corpo para evitar danos na incisão ou a ruptura do saco causada pela tração forçada.

Método de Esterilização

A **BOLSA COLETORA ENDOBAG PARA HISTERO TAIMIN** é esterilizada por Óxido de Etileno - Eto.

Advertências

Não se aplica.

Precauções

- É proibido o uso de produtos após o prazo de validade da esterilização.

Se a embalagem estiver danificada ou contaminada, é estritamente proibido utilizá-la.

- Este produto é descartável, sendo estritamente proibido reesterilizá-lo e reutilizá-lo. - Não utilize equipamentos afiados ou de alta temperatura, nem entre em contato direto com o saco, a fim de evitar que ele se rompa.

- Ao retirar o saco, evite puxar com força; quando houver mais tecidos no saco, não o retire da parede abdominal.

- Sugere-se que, após a abertura do saco ser retirada da parede abdominal, parte do tecido interno do saco seja removido com a pinça extratora antes de ser retirado do corpo.

- Este produto deve ser operado por um cirurgião profissional.

- Os usuários devem escolher as especificações adequadas de acordo com o tamanho do tecido.

- Consulte as instruções de uso.

- Verifique a vedação e a integridade do saco antes de usar. Se o saco estiver danificado, não o utilize.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Contraindicações

Não se aplica.

Responsável Legal: Marcos Fang Tam

Responsável Técnica: Desiree Barros Rossato
CRF/PB: 5028