



INSTRUÇÕES DE USO

PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN



Detentor do Registro:

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 02.814.280/0001-05

Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,

Parque Industrial, João Pessoa / PB

Cep: 58082-057

Tel: +55 83 3049 8000

Site: www.taimin.com.br

PRODUTO DE USO MÉDICO.

O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.

PRODUTO ESTÉRIL.

ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO.

O produto deve ser armazenado e transportado em uma sala com umidade relativa não superior a 80%, livre de gases corrosivos, bem ventilada e limpa, evitando a luz solar direta, com temperatura 10°C ~ 30°C.

Manual de Instruções

Nome Técnico: Protetores

Nome Comercial: Protetor De Incisão Descartável Taimin

Registro Anvisa Nº: 80082919081

Validade: 03 anos

Fabricado por:

HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 1668, Chunjiang East Road, Economic

Development Zone Tonglu,

Zhejiang Province - China

Tel: +86 571 69900010

Site: www.kangjimed.com

Modelos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
115Y.101	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 50/60MM X 150MM	
115Y.103	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 70/70MM X 200MM	
115Y.105	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 90/90MM X 200MM	
115Y.108	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 110/110MM X 250MM	
115Y.102	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 60/70MM X 200MM	
115Y.104	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 80/90MM X 200MM	
115Y.109	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 120/130MM X 250MM	
115Y.110	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 150/160MM X 250MM	
115Y.113	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 180/190MM X 250MM	
115Y.116	PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN, 220/230MM X 250MM	



Forma de Apresentação

O **PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN** é comercializado de forma estéril em papel Tyvek (embalagem primária), sendo acondicionado posteriormente, em caixa de papel cartonado (embalagem secundária), podendo ser comercializado individualmente ou em embalagem contendo 10 (dez) unidades, devidamente rotulado.

Composição

O **PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN** é fabricado em Poliuretano Termoplástico (TPU).

Indicação de Uso / Finalidade

O **PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN** é destinado para cirurgia endoscópica e cirurgia de incisão pequena, sua função é estender o campo cirúrgico, proteger a incisão de danos, minimizando a possibilidade de infecção.

Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

O **PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN** atua como um dispositivo de proteção e ampliação do campo cirúrgico em procedimentos de cirurgia endoscópica e cirurgias de pequena incisão.

Após a realização da incisão, o dispositivo é posicionado de modo a revestir e proteger suas bordas, promovendo a retração uniforme dos tecidos moles e a estabilização da abertura cirúrgica. Seu funcionamento permite a extensão controlada do campo operatório, facilitando o acesso visual e instrumental ao sítio cirúrgico, ao mesmo tempo em que protege a incisão contra danos mecânicos decorrentes da manipulação de instrumentos.

Além disso, o dispositivo cria uma barreira física entre a incisão e o meio externo, contribuindo para a redução do risco de contaminação e infecção do sítio cirúrgico durante todo o procedimento.

Por ser descartável e de uso único, o **PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN** auxilia na manutenção das condições assépticas do procedimento, promovendo maior segurança ao paciente e ao ato cirúrgico.

Modo de Uso do Produto

1) Selecione o produto indicado e retire-o da embalagem estéril.

2) Faça uma incisão de comprimento adequado na parede abdominal.

3) Aperte o anel interno e insira-o no entalhe.

4) Puxar o anel interno e externo para abrir a incisão.

5) Após a operação, retire-o: gire o anel externo para fora para soltar o canal e, em seguida, puxe o anel interno para fora.

Método de Esterilização

O **PROTETOR DE INCISÃO DESCARTÁVEL TAIMIN** é esterilizado por Óxido de Etileno - Eto.

Advertências

Não se aplica.

Precauções

1) A vida útil do produto é de 3 anos. É proibido o uso do produto além do prazo de validade da esterilização.

2) Este produto é esterilizado. Verifique cuidadosamente a embalagem interna do produto antes de usar. Se estiver danificado ou contaminado, é proibido usar.

3) Tome cuidado para descartar o produto e a embalagem após o uso, bem como dispositivos não utilizados, mas abertos, de acordo com as práticas de descarte de resíduos hospitalares e regulamentos locais, incluindo, sem limitação, àqueles relacionados à saúde e segurança humana e ao meio ambiente.

4) Favor ler atentamente este manual antes de utilizar.

5) Durante a operação clínica, o contato direto entre os canais e os instrumentos cortantes deve ser evitado.

6) Qualquer incidente grave ocorrido que se relacione ao dispositivo deve ser comunicado imediatamente.

7) Se a embalagem do instrumento estiver danificada, não use.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Contraindicações

É proibido para quem é alérgico a este material. Deve ser usado com cautela para quem tem alta sensibilidade.

Responsável Legal: Marcos Fang Tam

Responsável Técnica: Desiree Barros Rossato
CRF/PB: 5028