



## INSTRUÇÕES DE USO

### BOLSA COLETORA BAG TAIMIN



#### Detentor do Registro:

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
CNPJ: 02.814.280/0001-05  
Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,  
Parque Industrial, João Pessoa / PB  
Cep: 58082-057  
Tel: +55 83 3049 8000  
Site: [www.taimin.com.br](http://www.taimin.com.br)

**PRODUTO DE USO MÉDICO.**  
**PRODUTO DESCARTÁVEL.**  
**REPROCESSAMENTO PROIBIDO.**  
**PRODUTO ESTÉRIL.**  
**ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO.**

O produto deve ser armazenado e transportado em uma sala com umidade relativa não superior a 80%, livre de gases corrosivos, bem ventilada e limpa, evitando a luz solar direta, com temperatura 10°C~+50°C.

#### Manual de Instruções

**Nome Técnico:** Bolsas Coletoras  
**Nome Comercial:** Bolsa Coletora Bag Taimin  
**Registro Anvisa N°:** 80082919082  
**Validade:** 03 anos

#### Fabricado por:

**HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.**

No. 1668, Chunjiang East Road, Economic Development Zone Tonglu, Zhejiang Province - China  
Tel: +86 571 69900010  
Site: [www.kangjimed.com](http://www.kangjimed.com)

## Modelos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
104Y.203	BOLSA COLETORA BAG SEM ALÇA TAIMIN, 300 ML	
104Y.204	BOLSA COLETORA BAG SEM ALÇA TAIMIN, 500 ML	
104Y.211	BOLSA COLETORA BAG SEM ALÇA TAIMIN, 1000 ML	
104Y.303	BOLSA COLETORA BAG COM ALÇA TAIMIN, 300 ML	
104Y.304	BOLSA COLETORA BAG COM ALÇA TAIMIN, 500 ML	
104Y.311	BOLSA COLETORA BAG COM ALÇA TAIMIN, 1000 ML	
104Y.314	BOLSA COLETORA BAG COM ALÇA TAIMIN, 1500 ML	

## Forma de Apresentação

A **BOLSA COLETORA BAG TAIMIN** é comercializada de forma estéril em invólucro de papel Tyvek + PE (embalagem primária), sendo acondicionado posteriormente, em caixa de papel cartonado (embalagem secundária), podendo ser comercializado individualmente ou em embalagem contendo 10 (dez) unidades, devidamente rotulado.

## Composição

A **BOLSA COLETORA BAG TAIMIN** é fabricada em Poliuretano Termoplástico (TPU), Polissulfeto de Fenileno (PPS) e Nylon.



## **Indicação de Uso / Finalidade**

A **BOLSA COLETORA BAG TAIMIN** é utilizada clinicamente em procedimentos cirúrgicos para coletar amostras e retirá-las do corpo.

## **Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação**

A **BOLSA COLETORA BAG TAIMIN** funciona como um dispositivo de contenção física, sendo introduzida no interior do corpo por meio de instrumental adequado. Após posicionamento, permite a coleta de amostras, possibilitando sua remoção de forma controlada durante o procedimento.

## **Modo de Uso do Produto**

- 1) Retire o produto da embalagem.
- 2) A haste precisa passar pelo trocarte para entrar no corpo.
- 3) Empurre a haste para dentro para estender a bolsa a partir da haste da manga e abra a bolsa pelo dispositivo de expansão.
- 4) Retire os tecidos ou espécimes excisados e coloque-os no saco;
- 5) Após todos os tecidos ou espécimes serem colocados na bolsa, modelo sem Alça: segure a haste e retire a bolsa do corpo; Modelo com Alça: segure a haste ou a corda e retire a bolsa do corpo, ou retire a haste, puxe a corda firmemente e retire a bolsa do corpo;
- 6) Retire o saco pela abertura da cânula e puxe-o para fora juntamente com a cânula.
- 7) Se o tecido a ser retirado for grande, após puxar a bolsa para fora da parede abdominal, pare de puxar com força. Primeiro, retire parte do tecido com uma pinça e, em seguida, puxe a bolsa para fora do corpo para evitar danos à incisão ou ruptura da bolsa causadas por tração excessiva.
- 8) Após o uso da bolsa, descarte o produto de acordo com as normas vigentes para resíduos de dispositivos médicos.

## **Método de Esterilização**

A **BOLSA COLETORA BAG TAIMIN** é esterilizado por Óxido de Etileno - Eto.

## **Advertências**

Não se aplica.

## **Precauções**

- 1) É proibido o uso de produtos que ultrapassaram o prazo de validade da esterilização. O uso do produto também é estritamente proibido caso a embalagem esteja

danificada ou contaminada.

- 2) Este produto é descartável, sendo estritamente proibido reesterilizá-lo e reutilizá-lo.
- 3) Não utilize equipamentos cortantes ou de alta temperatura, nem entre em contato direto com a embalagem para evitar que ela se rompa.
- 4) Ao retirar a bolsa, evite puxar com força; quando houver muitos tecidos na bolsa, não a puxe para fora da parede abdominal.
- 5) Sugere-se que, após a abertura da bolsa ser puxada para fora da parede abdominal, parte do tecido interno da bolsa seja removida com a pinça extratora antes de ser retirada do corpo.
- 6) Este produto deve ser operado por um cirurgião profissional.
- 7) Os usuários devem escolher as especificações adequadas de acordo com o tamanho do tecido.
- 8) Consulte as instruções de uso.
- 9) Verifique se a embalagem está bem fechada e se há integridade antes de usar. Se a sacola estiver danificada, não a utilize.

## **Efeitos Adversos**

Não se aplica.

## **Contraindicações**

Não se aplica..

**Responsável Legal:** Marcos Fang Tam

**Responsável Técnica:** Desiree Barros Rossato  
CRF/PB: 5028