

## INSTRUÇÕES DE USO

### BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN



#### Detentor do Registro:

CENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
 CNPJ: 02.814.280/0001-05  
 Rua Industrial José Flávio Pinheiro, 1150,  
 Parque Industrial, João Pessoa / PB  
 Cep: 58082-057  
 Tel: +55 83 3049 8000  
 Site: [www.taimin.com.br](http://www.taimin.com.br)

**PRODUTO DE USO MÉDICO.  
 O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.  
 PRODUTO ESTÉRIL.  
 ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO.**

O produto deve ser armazenado e transportado em local seco, ventilado e sem gás corrosivo, e longe de luz solar direta e chuva, com temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), e umidade relativa do ar não superior a 80%.




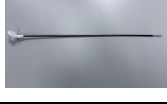






#### Manual de Instruções

**Nome Técnico:** Introdutores  
**Nome Comercial:** Bainha De Acesso Ureteral Uropro Taimin  
**Registro Anvisa Nº:** 80082919067  
**Validade:** 03 anos

#### Fabricado por:

**HUNAN VMT TECHNOLOGY CO., LTD.**  
 Floor 1-2, Building 4,  
 High-tech Industry Development Zone  
 Medical Device Industrial Park,  
 415400, Jinshi City, Hunan Province,  
 P.R. China

## Modelos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
BA095035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 9.5FR x 35cm	
BA095045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 9.5FR x 45cm	
BA100035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 10FR x 35cm	
BA100045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 10FR x 45cm	
BA110035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 11FR x 35cm	
BA110045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 11FR x 45cm	
BA120035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 12FR x 35cm	
BA120045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 12FR x 45cm	
BA140035	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 14FR x 35cm	
BA140045	Bainha de Acesso Ureteral UroPro Taimin 14FR x 45cm	

## Forma de Apresentação

A **BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN** é comercializado de forma estéril em filme composto Tyvek (embalagem primária), sendo acondicionado posteriormente em caixa de papel cartonado (embalagem secundária) podendo ser comercializado individualmente ou em embalagem contendo 10 (dez) unidades devidamente rotulado.



## Composição

A **BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN** é composta por Poliamida com Revestimento Hidrofílico, Aço Inoxidável 304 (SS 304), Politetrafluoroetileno (PTFE), Nylon, Polietileno (PE) e Polipropileno (PP).

## Indicação de Uso / Finalidade

A **BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN** tem como finalidade manter o acesso ureteral aberto para a realização de procedimentos urológicos endoscópicos, a fim de facilitar a passagem de endoscópios e outros instrumentos nas vias urinárias.

Durante trocas repetidas de instrumentos, a bainha faz a proteção do ureter. A bainha também protege instrumentos delicados e endoscópios flexíveis menores contra danos.

Tem um revestimento hidrofílico para criar uma superfície de baixo atrito à medida que o ureter é dilatado.

## Modo de Uso do Produto

- Selecione a especificação e o modelo adequados do produto, conforme necessário.
- Verifique a embalagem antes de usar. Não use o produto se ele estiver danificado ou tiver sido aberto.
- Insira o fio guia (produto não objeto deste registro) no ureter até a pelve renal, com a ajuda de um endoscópio.
- Trave firmemente o clipe de travamento do dilatador na base do tubo da bainha.
- Empurre o conjunto do dilatador e do tubo da bainha ao longo do fio guia para que ele entre no ureter. Observação: Uma pequena quantidade de lubrificante estéril pode ser aplicada ao conjunto dilatador/tubo da bainha.
- Confirme se o conjunto do dilatador e do tubo da bainha está no lugar por meio de fluoroscopia.
- Fixe o tubo da bainha na posição, solte o clipe de travamento e remova o dilatador.
- Insira os instrumentos, como o endoscópio, no tubo da bainha.
- Após o uso, descarte-o uniformemente de acordo com os procedimentos de descarte do hospital.

Observação: A base do tubo da bainha pode ser fixada externamente com suturas. Os orifícios de sutura estão localizados na base do tubo da bainha.

## Condições de Manipulação

O produto só pode ser manipulado por profissional devidamente habilitado.

## Método de Esterilização

A **BAINHA DE ACESSO URETERAL UROPRO TAIMIN** é esterilizado por Óxido de Etileno - Eto.

## Advertências

Não se aplica.

## Precauções

- Este produto só pode ser manuseado pela equipe médica. Antes de usar, é essencial ler atentamente o manual de instruções.
- O período de validade desse produto é de três anos. Confirme a data de validade antes de usar. O uso de produtos vencidos é estritamente proibido.
- Não altere arbitrariamente a estrutura deste produto durante o uso.
- Este produto é esterilizado com óxido de etileno. Seu uso é estritamente proibido caso a embalagem esteja danificada ou caso haja alterações na aparência e na estrutura do produto.
- Resíduos devem ser descartados de acordo com os regulamentos do hospital ou do departamento de proteção ambiental.

## Efeitos Adversos

Não se aplica.

## Contraindicações

Não se aplica.

**Responsável Legal:** Marcos Fang Tam  
**Responsável Técnica:** Desiree Barros Rossato  
CRF/PB: 5028